



1. ご使用前に

- 1) インジェクターに滅菌ヘパリン加生理食塩液を充填します。
(生理食塩液500mLにつきヘパリン5000単位)
- 2) 耐圧チューブをインジェクターに接続し、カテーテルのB. 注入口に接続します。
- 3) インジェクターを動作させてカテーテルが正常に作動することを体外で確認してください。
※作動させる際、滅菌済みの清潔なコップ、またはビーカー等に入れた生理食塩液が吸引されることを確認してください。
- 4) カテーテルから耐圧チューブを取り外します。

＜インジェクター設定値＞

サイズ	流量	圧力	時間
12Fr	7mL/sec	1000psi	5sec
8Fr	3mL/sec	1000psi	10sec

2. 使用方法

- 1) 適合するシースを患者の血管に挿入します。
- 2) カテーテルの両方のルーメンを、滅菌ヘパリン加生理食塩液でフラッシュ洗浄します。
- 3) C. 排出口よりガイドワイヤー (0.035 inch) を挿入し、カテーテルを目的部位まで進めてください。
この時、C. 排出口に三方活栓付止血弁を接続すると、ガイドワイヤー操作時の空気混入・漏血を抑えることができます。
- 4) カテーテルのA. 吸引口を血管内に進めた後、ガイドワイヤーを抜き、C. 排出口の三方活栓付止血弁を外してください。
- 5) 付属の耐圧チューブをカテーテルのB. 注入口に接続し、排液バッグをC. 排出口に接続します。
- 6) インジェクターを動作させて血栓を吸引します。
※作動させる前に、必ずスナッピングが開いていることを確認してください。
※作動後は、毎回必ずスナッピングを閉じてください。
- 7) 数回の吸引を行った後、C. 排出口側を三方活栓付止血弁に付け替えて血管造影を行い、血栓の一部が吸引されていることを確認してください。
(血栓が吸引されている場合には出血量に注意しながら、6) の操作を繰り返して血栓を除去してください。)

ご使用前に製品の添付文書を確認の上、記載されている説明に従って正しく使用してください。



発売元

メディキット株式会社

製造販売元

東郷メディキット株式会社